



In gebruikstelling SATEX type 46 SA250

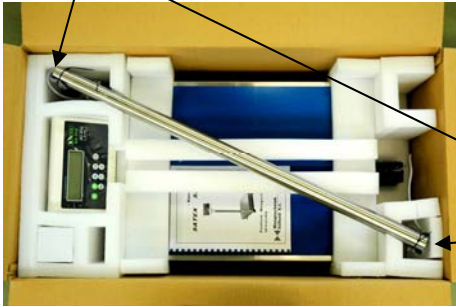


1. **Zó treft u de weegschaal aan in de doos, nadat u deze hebt geopend en de afdekschuimlaag hebt opgetild.**
Let goed op of de kabel aan beide uiteinden van de buis onbeschadigd is.




2. **Neem als eerste de buis met kabel en kantelmechanisme uit de verpakking.**
Laat de weegschaal nog in de doos staan.

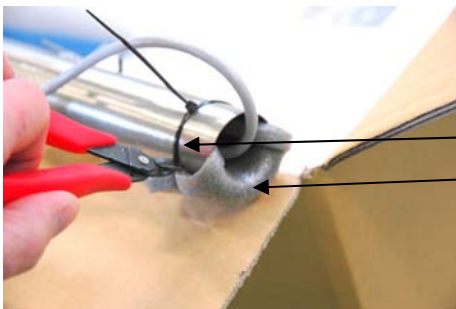

3. **Knip aan beide zijden van de buis het kabelbandje door en verwijder het transportschuim uit de buis.**

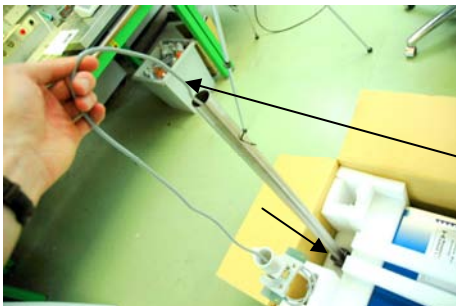


4. **Houd de kabel aan bovenzijde van de buis licht aangespannen en laat vervolgens de buis voorzichtig in de voet van het statief zakken.**
Let op dat de kabel bij het inschuiven niet beschadigd wordt.

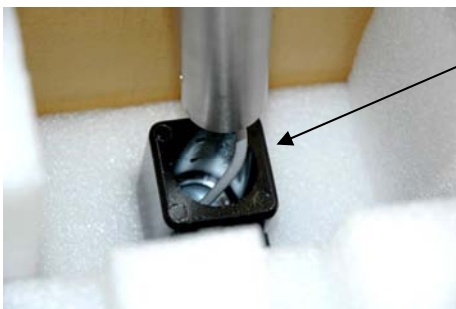




5.
De overtollige kabel in de buis terug-duwen.
Zorg ook hier dat de kabel niet beschadigd
aan de rand van de buis.
Let op! de rand van de buis kan scherp zijn.

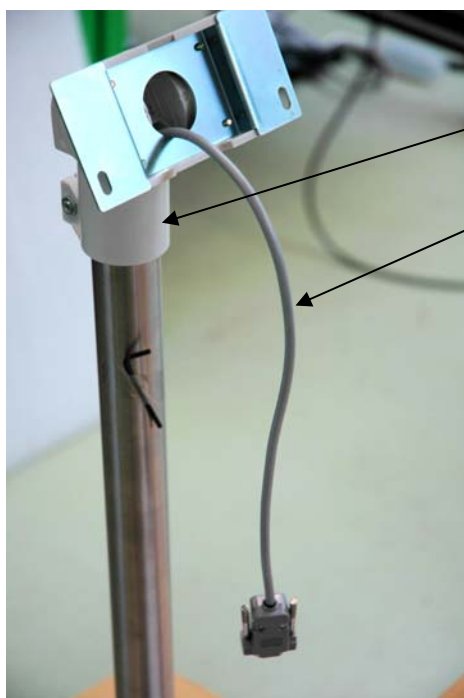

6.
Schuif vervolgens het kantel-mechanisme òp
de bovenzijde van de buis.
Zorg dat er ca. 25 cm. kabel bóven de buis
overblijft



7.
Borg het kantelmechanisme door met
een steeksleutel 10 de bout aan te
draaien.

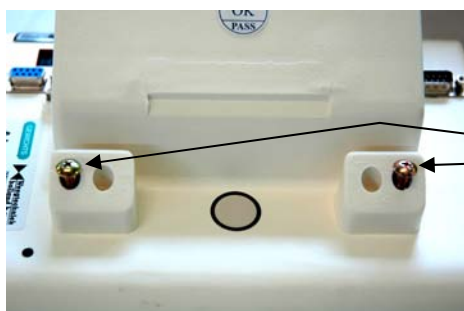

8.
Haal de afleesunit uit de verpakking en
leg deze met de voorzijde op de tafel.
Draai deze twee schroeven los en houd
deze binnen bereik.



- 9.**
Houd de afleesunit met de schroefgaten vóór de corresponderende gaten in het kantelmechanisme.
Laat de kabel onderlangs meelopen.



- 10.**
Steek aan beide zijden van het kantelmechanisme een schroef door het gat en schroef hiermee de afleesunit vast aan het kantelmechanisme.



- Detailfoto van gemonteerde schroef.



- 11.**
Steek de connector van het weegplatform in het chassisdeel in de achterzijde (links).



- 12.**
Draai vervolgens met de verlengde schroeven de connector vast, door met de hand de schroeven rechtsonder te draaien.



13.
Neem de complete weegschaal nu uit de verpakking en plaats deze op een stabiele en vlakke ondergrond

Eventueel kan ook de verpakking rondom de weegschaal los worden gesneden en verwijderd.

Draai de afleesunit in de gewenste afleesrichting.

Zet het statief vast in de voet door met de meegeleverde inbussleutel de twee schroeven in te draaien.



14.
Zorg dat de weegschaal in waterpas stand komt. De libelle moet binnen de zwarte cirkel staan.
Verdraai evt. één of meerdere stelvoeten om de libelle binnen de cirkel te krijgen.



15.
Schakel de weegschaal in met toets: 
Wacht totdat het display de nulstand weergeeft.

De weegschaal is nu klaar voor gebruik.
Overige informatie vindt U in de bijgeleverde handleiding.